

Kas yra Artelac® Triple Action?

Artelac® Triple Action – tai skaidrus akių tirpalas, kurio sudėtyje yra 0,24 % hialurono rūgšties (natrio hialuronato), karbomero, glicerolio, lipidų komponento (vidutinio ilgio grandinės trigliceridų), natrio hidroksido ir injekcinio vandens.

Dėl pažangios formulės produktas yra labai gerai toleruojamas, nes jame nėra konservantų ir buferių.

Galima vartoti 6 mėnesius po pirmojo atidarymo.

Kaip vartoti Artelac® Triple Action?

Artelac® Triple Action yra akių lubrikantas, veikiantis visus tris akių plėvelės sluoksnius ir užtikrinantis akies paviršiaus drėkinimą esant sausų akių pojūčiui.

Kam skirtas Artelac® Triple Action?

Artelac® Triple Action – įkvėptas natūralios ašarų plėvelės. Jo sudėtyje yra natūralios drėkinimo medžiagos – hialurono rūgšties (natrio hialuronato pavidalu), kuri randama sveikos žmogaus akies struktūrose ir natūralioje ašarų plėvelėje, bei dvi papildomos drėkinimo medžiagos: glicerolis ir karbomeras. Taip pat sudėtyje yra papildomo lipidų komponento (vidutinio ilgio grandinės trigliceridų). **Artelac® Triple Action** veikia visus tris ašarų plėvelės sluoksnius: lipidų, vandeninį ir mucino.

Artelac® Triple Action yra sukurtas taip, kad išliktų ant akies paviršiaus ir intensyviai drėkindamas akimirksniu ir ilgam numalšintų simptomus. Produktas idealiai tinka visiems kenčiantiems nuo įvairių sausų akių simptomų, pvz., akių nuovargio, įtampos, smėlio pojūčio akyse, deginimo ir (arba) ašarojimo.

Akių sausumą sukelia:

- išoriniai veiksniai, tokie kaip ilgas naudojimas kompiuteriu, oro kondicionieriai, šildymas, cigarečių dūmai, taip pat vėjuotas oras ir kontaktiniai lęšiai;
- kiti veiksniai, pavyzdžiui, tam tikri vaistai (kontraceptinės tabletės, antihistamininiai vaistai, beta-blokatoriai, antispazminiai vaistai, šlapimo išsiskyrimą skatinantys vaistai) bei tam tikros ligos, skatinančios akių sausumo atsiradimą.

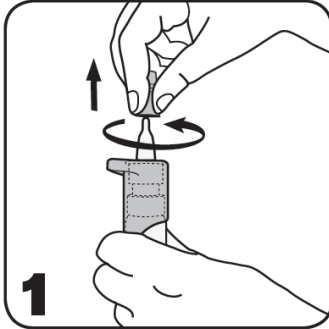
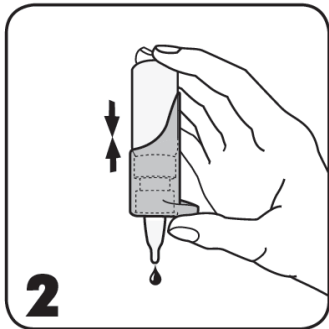
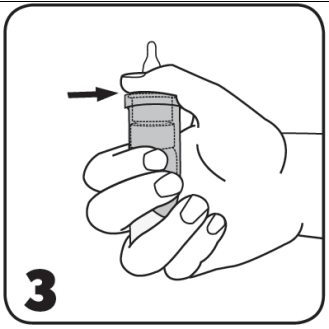

Kaip dažnai derėtų vartoti Artelac® Triple Action?

Lašinkite vieną **Artelac® Triple Action** lašą į akį taip dažnai, kaip pageidaujate. Preparatą galite vartoti kasdien ir taip dažnai, kaip pageidaujate. Vartojimo trukmė neribojama.

Kaip vartoti Artelac® Triple Action?

Dėl patentuoto pumpavimo mechanizmo **Artelac® Triple Action** tirpalas yra be konservantų.

Bendrieji reikalavimai: prieš kiekvieną vartojimą nusiplaukite rankas. Stenkitės, kad buteliuko galiukas nesiliestų su pirštais ar akimis, nes galite užteršti tirpalą arba susižaloti.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1</p> | <p>1. Kiekvieną kartą, prieš vartodami, sukamuoju judesiu nuimkite skaidrų baltą apsauginį dangtelį.</p> |
|  <p>2</p> | <p>2. Dėmesio! Vartojant pirmą kartą arba kurį laiką nevirtojus: apverskite buteliuką ir spauskite tiek kartų, kol nulašės lašas.</p> |
|  <p>3</p> | <p>3. Laikykite buteliuką kaip pavaizduota: uždėkite nykštį ant ergonomiškos nykščio atramos, o kitais pirštais suimkite buteliuko apatinę dalį. Du pirštai turėtų laikyti buteliuko dugną.</p> |
|  <p>4</p> | <p>4. Apverskite buteliuką. Šiek tiek atloškite galvą. Laisvos rankos pirštu švelniai patraukite apatinį voką į apačią, laikykite buteliuką vertikaliai virš akies. Švelniai paspauskite pumpavimo mechanizmą, kad į akį įlašintumėte vieną lašą.</p> <p>Įsilašinę užmerkite akį ir pamirskėkite, kad lašas optimaliai pasiskirstytų ant akies paviršiaus.</p> |
| <p>5. Po vartojimo nedelsdami nukratykite lašų likučius ir uždėkite ant buteliuko skaidrų baltą apsauginį dangtelį.</p> | |

Baigus vartoti, dėl buteliuko dizaino jame lieka nedidelis tirpalo kiekis. Iš buteliuko galima išlašinti visą nurodytą tirpalo kiekį.

Kada draudžiama vartoti Artelac® Triple Action?

Nevartokite šio produkto, jei yra padidėjęs jautrumas kuriai nors iš jo sudedamųjų dalių.

Svarbi informacija apie Artelac® Triple Action vartojimą

- Labai retais atvejais buvo pranešta apie padidėjusio jautrumo reakciją. Tokiais atvejais vartojimą reikia nutraukti. Jeigu jaučiate nuolatinį diskomfortą ar dirginimą, nutraukite šio produkto vartojimą ir pasikonsultuokite su savo gydytoju.
- Pavartoję šio produkto laikinai galite matyti neryškų vaizdą ir tai gali turėti neigiamą įtaką vairavimui ar mechanizmų valdymui.
- Nelieskite akies paviršiaus buteliuko galiuku, nes galite pažeisti akies paviršių.
- Pavartoję, nukratykite lašų likučius.
- Po pirmojo buteliuko atidarymo nesidalinkite juo su kitais.
- Produktą vartojant neatsargiai, ne pagal vartojimo instrukciją, jis gali išslysti iš rankos ir sužeisti akį.
- Prieš pradėdami vartoti produktą, išimkite kontaktinius lęšius.
- Prieš vartodami kitą akims skirtą produktą ar prieš keisdami kontaktinius lęšius, palaukite maždaug 15 minučių.
- Medicinos priemonę išmeskite po 6 mėnesių nuo pirmojo atidarymo.
- Nevartokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Nevartokite, jei pažeista pakuotė ar buteliukas.

- **Artelac® Triple Action** buteliukas turi smulkių plastikinių dalių, kurias gali praryti maži vaikai. Todėl, dėl uždusimo pavojaus, **Artelac® Triple Action** turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kaip laikyti Artelac® Triple Action?

Laikykite 1–25 °C temperatūroje.

Dėl buteliuko dizaino **Artelac® Triple Action** galima vartoti 6 mėnesius nuo pirmojo atidarymo.

Pakuotė:

Artelac® Triple Action tiekiamas 10 ml akių lašų pakuotėje.

0,24% natrio hialuronatas, karbomeras, glicerolis, lipidų komponentas (vidutinio ilgio grandinės trigliceridai), natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

- Ilgalais drėkinimas ir greitas poveikis.
- Veikia visus 3 ašarų plėvelės sluoksnius – įkvėpta natūralios ašarų plėvelės.
- Sudėtyje yra natūralios drėkinimo medžiagos – hialurono rūgšties, glicerolio, karbomero ir papildomo lipidų komponento (vidutinio ilgio grandinės trigliceridų).
- Labai gerai toleruojamas, nes sudėtyje nėra konservantų ir buferių.
- Produktas puikiai tinka žmonėms, patiriantiems sausų akių simptomus, pavyzdžiui, nuovargį, įtampą, smėlio ir deginimo pojūčius ir (arba) ašarojimą.
- Pažangi drėkinimo sistema.
- Gali būti vartojamas 6 mėnesius nuo pirmojo atidarymo.

Platintojas: UAB PharmaSwiss, Užnerio g. 1, 47484 Kaunas

®/™ yra „Bausch & Lomb Incorporated“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai.

www.artelac.lt

www.bausch.lt